

MYCLIC®

EDUKAČNÍ MATERIÁLY




Určeno pro zdravotnické pracovníky

Tento edukační materiál vychází ze schválených informací o přípravku ENBREL® (etanercept), které naleznete na internetové adrese <http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php>

PODROBNÝ PŘÍVODCE POUŽÍVÁNÍM PŘÍPRAVKU

ENBREL® 25 mg a 50 mg INJEKČNÍ ROZTOK V PŘEDPLNĚNÝCH PERECH MYCLIC

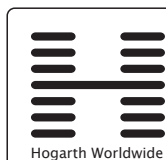

Project and Job Number
706470_1015921

Publication

Insertion Date

Contact

Client
Pfizer Limited

Market
Czech Republic

Operator
Hasan, Gaziul

Revision

Type Area Box (h x w)

–

Trim Box (h x w)
148.0 x 210.0 mm

Bleed Box (h x w)
154.0 x 216.0 mm

Date & Time
09/01/2018 05:23

Operator

Proofreader

Line Manager

Account Manager

Light Box

Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black
Wiro Guide

MYCLIC®

ENBREL® se dodává jako předplněné pero 25 mg nebo 50 mg.
Pera se liší vzhledem, ovšem pokyny pro obě tato pera se shodují.

ENBREL® 25 mg**ENBREL® 50 mg**

Project and Job Number
706470_1015921

Publication

Insertion Date

Contact

Client
Pfizer Limited

Market
Czech Republic

Operator
Hasan, Gaziul

Revision

Type Area Box (h x w)
–

Trim Box (h x w)
148.0 x 210.0 mm

Bleed Box (h x w)
154.0 x 216.0 mm

Date & Time
09/01/2018 05:23

Operator

Proofreader

Line Manager

Account Manager

Light Box

Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black
Wiro Guide


1. krok: Příprava na injekci ENBREL®

Pomůcky, které budete potřebovat



Zvolte čistou a dobře osvětlenou rovnou pracovní plochu. Oblast vpichu a veškeré pomůcky udržujte pokud možno ve sterilním stavu. Na zvolenou plochu si položte:

- Jedno předplněné pero MYCLIC a tampon napuštěný alkoholem. Vyměte je z papírové krabice s pery, kterou uchovávejte v chladničce (pero neprotřepávejte).
- Jeden chomáček vaty nebo gázy.

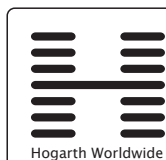

Project and Job Number
706470_1015921

Publication

Insertion Date

Contact

Client
Pfizer Limited

Market
Czech Republic

Operator
Hasan, Gaziul

Revision

Type Area Box (h x w)

Trim Box (h x w)
148.0 x 210.0 mm

Bleed Box (h x w)
154.0 x 216.0 mm

Date & Time
09/01/2018 05:23

Operator

Proofreader

Line Manager

Account Manager

Light Box

Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black
Wiro Guide

MYCLIC®

1. krok: Příprava na injekci ENBREL®



Pomůcky, které budete potřebovat



Project and Job Number
706470_1015921

Publication

Insertion Date

Contact

Client
Pfizer Limited

Market
Czech Republic

Operator
Hasan, Gaziul

Revision

Type Area Box (h x w)

–

Trim Box (h x w)

148.0 x 210.0 mm

Bleed Box (h x w)

154.0 x 216.0 mm

Date & Time

09/01/2018 05:23

Operator

Proofreader

Line Manager

Account Manager

Light Box

Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black
Wiro Guide

1. krok: Příprava na injekci ENBREL®

Prvky pera MYCLIC®




Tip k předvedení

Použijte předváděcí pero k ukázání těchto prvků:

- › Bílá krytka jehly.
- › Aktivační tlačítko.
- › Čirý průzor pera (před injekcí musí být čirý).
- › Datum použitelnosti.

Po obstarání všech pomůcek, které budete k injekci potřebovat, zkontrolujte na peru MYCLIC datum použitelnosti. Pokud datum uplynulo, pero nepoužijte a odevzdejte je v lékárně. Zkontrolujte také roztok v peru MYCLIC pohledem skrz čirý průzor pera. Roztok musí být čirý nebo mírně opalizující, bezbarvý nebo světle žlutý, a může obsahovat malé bílé nebo téměř průsvitné bílkovinné částice. Tento vzhled je pro přípravek ENBREL® zcela běžný. Roztok nepoužívejte, pokud má změněnou barvu, je zakalený nebo pokud jsou v něm jiné než uvedené částice. Pokud máte obavy kvůli barvě roztoku, poraďte se v lékárně. Pero neprotřepávejte. Krabičku s pery uchovávejte v chladničce při teplotě mezi 2 °C a 8 °C. Chraňte před mrazem.

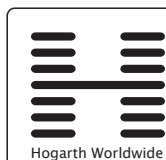

Project and Job Number

706470_1015921

Publication

Insertion Date

Contact

Client

Pfizer Limited

Market

Czech Republic

Operator

Hasan, Gaziul

Revision

Type Area Box (h x w)

–

Trim Box (h x w)

148.0 x 210.0 mm

Bleed Box (h x w)

154.0 x 216.0 mm

Date & Time

09/01/2018 05:23

Operator

Proofreader

Line Manager

Account Manager

Light Box

Light Box

Cyan

Magenta

Yellow

Black

Wiro Guide

MYCLIC®

1. krok: Příprava na injekci ENBREL®

Aktivační tlačítko
(zelené na peru 50 mg
a šedé na peru 25 mg)

Datum použitelnosti


Bílá krytka jehly



Čirý průzor pera
(kapalina má být před injekcí čirá)

Součásti pera MYCLIC®

6

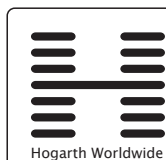

Project and Job Number
706470_1015921

Publication

Insertion Date

Contact

Client
Pfizer Limited

Market
Czech Republic

Operator
Hasan, Gaziul

Revision

Type Area Box (h x w)

–

Trim Box (h x w)
148.0 x 210.0 mm

Bleed Box (h x w)
154.0 x 216.0 mm

Date & Time
09/01/2018 05:23

Operator

Proofreader

Line Manager

Account Manager

Light Box

Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black
Wiro Guide

1. krok: Příprava na injekci ENBREL®


Před použitím vyčkejte na ohřátí pera MYCLIC® na pokojovou teplotu



Klíč k úspěšnému podání injekce

- › Vyčkejte přibližně čtvrt až půl hodiny na přirozené ohřátí roztoku v peru MYCLIC na pokojovou teplotu.¹

Ponechte bílou krytku jehly na svém místě a vyčkejte asi čtvrt až půl hodiny na přirozené ohřátí roztoku ENBREL® na pokojovou teplotu. Pro podání injekce není ohřátí na pokojovou teplotu **bezpodmínečně nutné**. Vyčkáte-li na ohřátí na pokojovou teplotu, vyhněte se případnému nepříjemnému pocitu při podávání injekce. Přípravek ENBREL® neohřívejte žádným jiným způsobem. Neohřívejte jej například v mikrovlnné troubě ani v horké vodě. Pera MYCLIC vždy uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

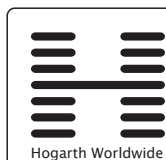

Project and Job Number
706470_1015921

Publication

Insertion Date

Contact

Client
Pfizer Limited

Market
Czech Republic

Operator
Hasan, Gaziul

Revision

Type Area Box (h x w)

–

Trim Box (h x w)
148.0 x 210.0 mm

Bleed Box (h x w)
154.0 x 216.0 mm

Date & Time
09/01/2018 05:23

Operator

Proofreader

Line Manager

Account Manager



Light Box

Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black
Wiro Guide

MYCLIC®

Před použitím nechte pero
MYCLIC® přirozeně ohřát
na pokojovou teplotu

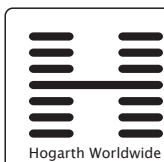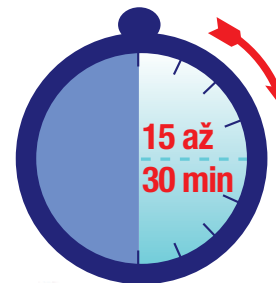

Project and Job Number
706470_1015921

Publication

Insertion Date

Contact

Client
Pfizer Limited

Market
Czech Republic

Operator
Hasan, Gaziul

Revision

Type Area Box (h x w)

–

Trim Box (h x w)
148.0 x 210.0 mm

Bleed Box (h x w)
154.0 x 216.0 mm

Date & Time
09/01/2018 05:23

Operator

Proofreader

Line Manager


Account Manager

Light Box

Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black
Wiro Guide

2. krok: Výběr místa vpichu

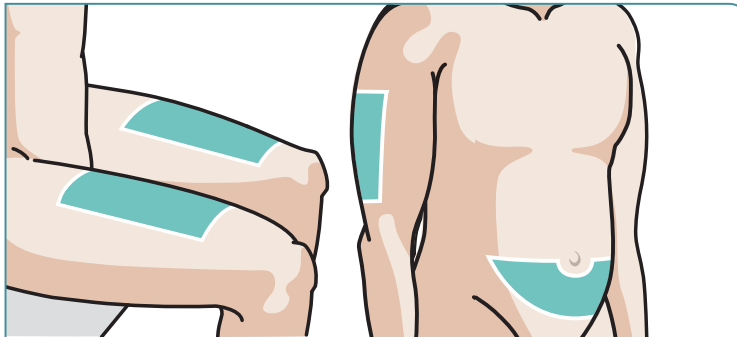


Tip k předvedení

- › Požádejte pacienty, aby ukázali na vhodné oblasti prstem, a ujistěte se tak, že chápou, které oblasti jsou pro místo vpichu vhodné.

Dalším krokem je výběr místa vpichu.

Jako místo vpichu doporučujeme střed přední strany stehna. Podle svého uvážení můžete použít rovněž oblast břicha, a to nejméně 5 cm od pupku.

Pokud injekci podává další osoba, může vpich provést na vnější straně paže nad loktem.

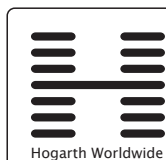

Project and Job Number
706470_1015921

Publication

Insertion Date

Contact

Client
Pfizer Limited

Market
Czech Republic

Operator
Hasan, Gaziul

Revision

Type Area Box (h x w)
–

Trim Box (h x w)
148.0 x 210.0 mm

Bleed Box (h x w)
154.0 x 216.0 mm

Date & Time
09/01/2018 05:23

Operator

Proofreader

Line Manager


Account Manager

Light Box

Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black
Wiro Guide

2. krok: Výběr místa vpichu

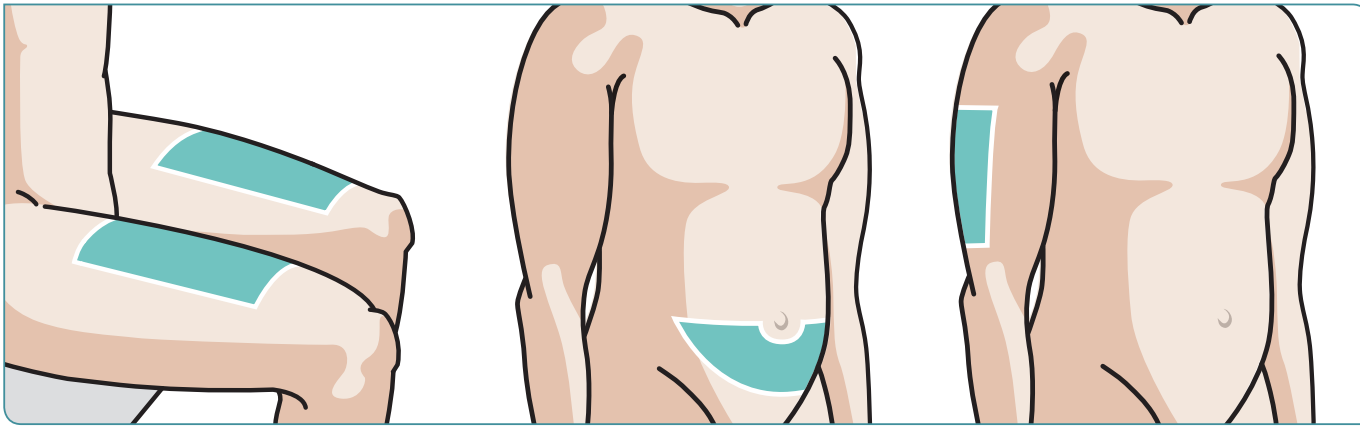

*Doporučené místo vpichu:
Střed přední strany stehna*

*Doporučené místo vpichu:
Oblast břicha. Zvolte místo
nejméně 5 cm od pupku.*

*Místo vpichu při podání
druhou osobou:
Vnější oblast nadloktí*

2. krok: Výběr místa vpichu


Každou novou injekci je třeba podat ve vzdálenosti nejméně 3 cm od předchozího místa vpichu.



Tip k předvedení

- › Ukažte pacientům odhadovanou vzdálenost tří centimetrů.
- › Upozorněte na veškeré problémové oblasti, kam pacienti nesmějí aplikovat injekce.

Každou další injekci je třeba podat ve vzdálenosti nejméně 3 cm (nebo na šířku 3 prstů) od místa posledního vpichu. Nepodávejte injekci do citlivé, tvrdé či pohmožděné kůže ani do podlitin a vyhněte se jizvám a škrábancům. Pokud má pacient lupénku, nepodávejte injekci do vystouplé, zbytnělé, zarudlé nebo strupovité kůže. Vedení záznamů může pomoci si vzpomenout, kam byla podána předchozí injekce.

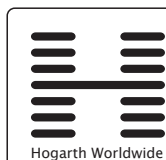

Project and Job Number
706470_1015921

Publication

Insertion Date

Contact

Client
Pfizer Limited

Market
Czech Republic

Operator
Hasan, Gaziul

Revision

Type Area Box (h x w)
–

Trim Box (h x w)
148.0 x 210.0 mm

Bleed Box (h x w)
154.0 x 216.0 mm

Date & Time
09/01/2018 05:23

Operator

Proofreader

Line Manager

Account Manager

Light Box

Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black
Wiro Guide

2. krok: Výběr místa vpichu



Každou další injekci je třeba podat ve vzdálenosti nejméně 3 cm od předchozího místa vpichu

3. krok: Injekční podání roztoku ENBREL®




Tip k předvedení

- › Předvedte správnou metodu čištění — otáčivý pohyb směrem ven.

Důkladně si umyjte ruce vodou a mýdlem. Zajistěte, aby bylo místo vpichu čisté. Můžete použít tampon napuštěný alkoholem a místo vpichu očistit krouživým pohybem a nechat uschnout.

Před podáním injekce se již tohoto místa nedotýkejte.

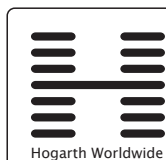

Project and Job Number
706470_1015921

Publication

Insertion Date

Contact

Client
Pfizer Limited

Market
Czech Republic

Operator
Hasan, Gaziul

Revision

Type Area Box (h x w)
–

Trim Box (h x w)
148.0 x 210.0 mm

Bleed Box (h x w)
154.0 x 216.0 mm

Date & Time
09/01/2018 05:23

Operator

Proofreader

Line Manager

Account Manager

Light Box

Light Box


Cyan
Magenta
Yellow
Black
Wiro Guide

3. krok: Injekční podání roztoku ENBREL®



3. krok: Injekční podání roztoku ENBREL®

Vytáhněte bílou krytku jehly v přímém směru z pera MYCLIC®

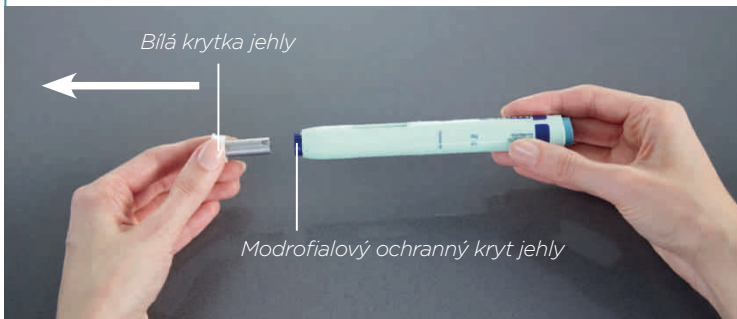


Tip k předvedení

- › Použijte předváděcí pero k předvedení správného sejmutí bílé ochranné krytky jehly.
- › Upozorněte na modrofialový ochranný kryt.

Vezměte do ruky pero a sejměte z jehly bílou krytku vytažením v přímém směru. Aby nedošlo k poškození jehly uvnitř pera MYCLIC®, bílou krytku jehly při snímání neohýbejte a nekrutíte s ní a po sejmutí se ji nepokoušejte nasadit zpět.

Po sejmutí bílé krytky jehly uvidíte modrofialový ochranný kryt jehly, který mírně vyčnívá z pera MYCLIC. Jehla zůstává chráněná uvnitř pera až do jeho aktivace.

Pero nepoužívejte v případě, že upadlo, když byla krytka jehly sejmutá.

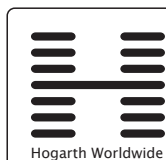

Project and Job Number
706470_1015921

Publication

Insertion Date

Contact

Client
Pfizer Limited

Market
Czech Republic

Operator
Hasan, Gaziul

Revision

Type Area Box (h x w)
–

Trim Box (h x w)
148.0 x 210.0 mm

Bleed Box (h x w)
154.0 x 216.0 mm

Date & Time
09/01/2018 05:23

Operator

Proofreader

Line Manager


Account Manager

Light Box

Light Box


Cyan
Magenta
Yellow
Black
Wiro Guide

3. krok: Injekční podání roztoku ENBREL®

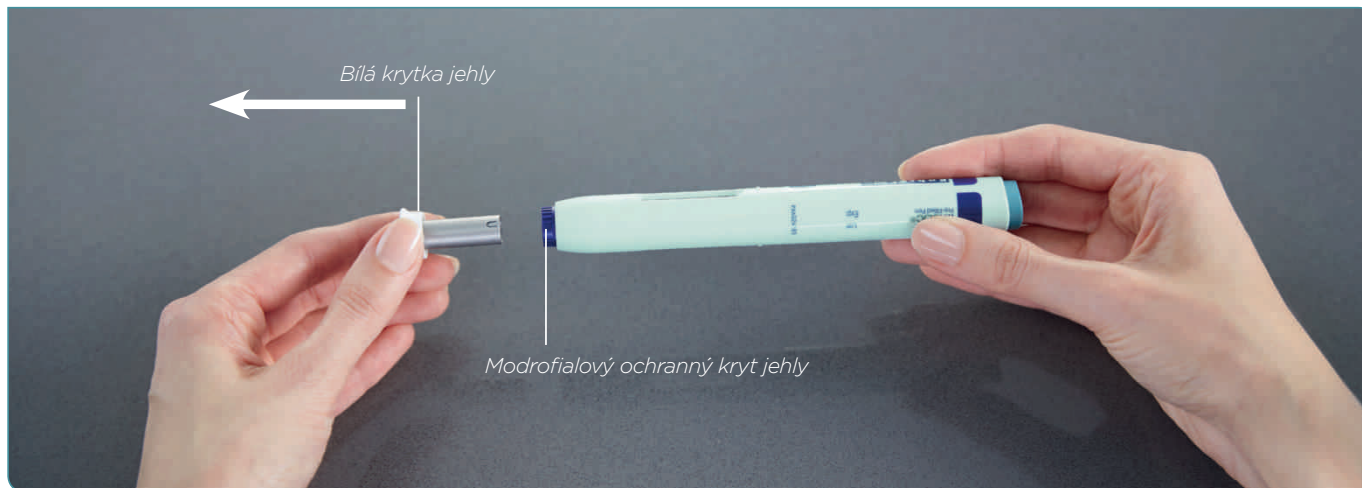


3. krok: Injekční podání roztoku ENBREL®

Přidržíte pero MYCLIC® kolmo k místu vpichu

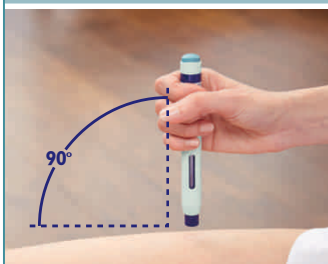

Pevně přitiskněte otevřený konec pera MYCLIC ke kůži

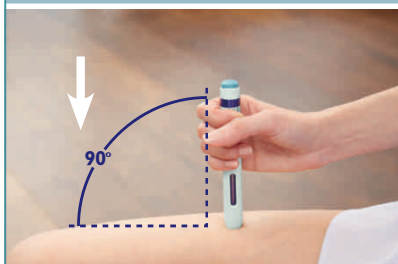

Tip k předvedení


- › Na doporučeném místě vpichu použijte předváděcí pero a ukažte, jak pero MYCLIC postupně překrývá ochranný kryt.

Klíč k úspěšnému podání injekce

- › Zelené aktivační tlačítko stiskněte teprve po **pevném** přitisknutí pera MYCLIC na kůži tak, že nebude vidět ochranný kryt jehly.

Držte pero MYCLIC kolmo (90°) k místu vpichu. Mírné sevření kůže v okolí místa vpichu mezi palec a ukazováček volné ruky může vpich usnadnit a zpříjemnit. Přitiskněte otevřený konec pera pevně na kůži tak, aby se modrofialový ochranný kryt jehly zcela zasunul do pera. Na kůži se patrně vytvoří malá jamka.

Pero MYCLIC lze aktivovat pouze po úplném zasunutí ochranného krytu jehly do pera.

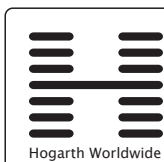

Project and Job Number
706470_1015921

Publication

Insertion Date

Contact

Client
Pfizer Limited

Market
Czech Republic

Operator
Hasan, Gaziul

Revision

Type Area Box (h x w)

–

Trim Box (h x w)
148.0 x 210.0 mm

Bleed Box (h x w)
154.0 x 216.0 mm

Date & Time
09/01/2018 05:23

Operator

Proofreader

Line Manager

Account Manager


Light Box

Light Box


Cyan
Magenta
Yellow
Black
Wiro Guide

MYCLIC®

3. krok: Injekční podání roztoku ENBREL®

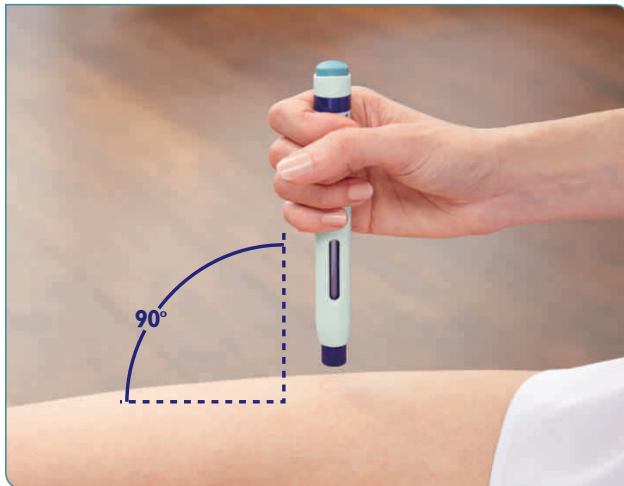

*Držte pero MYCLIC® kolmo
k místu vpichu*

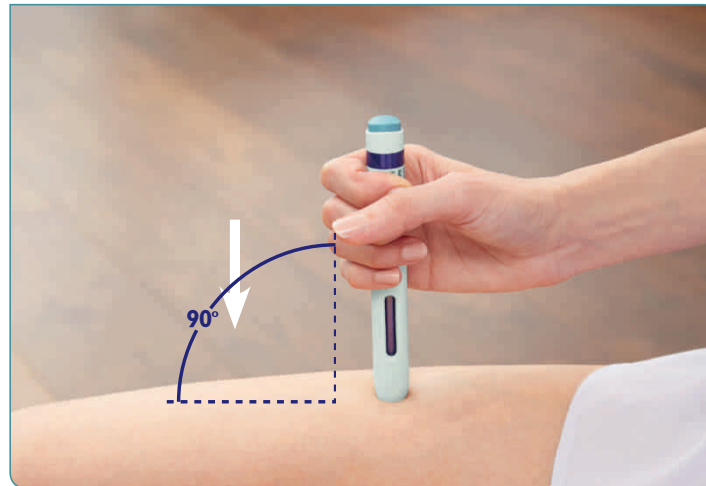

*Pevně přitiskněte otevřený konec pera
MYCLIC ke kůži*



Project and Job Number
706470_1015921

Publication

Insertion Date

Contact

Client

Pfizer Limited

Market

Czech Republic

Operator

Hasan, Gaziul

Revision

Type Area Box (h x w)

–

Trim Box (h x w)

148.0 x 210.0 mm

Bleed Box (h x w)

154.0 x 216.0 mm

Date & Time

09/01/2018 05:23

Operator

Proofreader

Line Manager

Account Manager

Light Box

Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black
Wiro Guide

3. krok: Injekční podání roztoku ENBREL®

Stiskněte střed
aktivačního tlačítka



Tip k předvedení

- › Použijte předváděcí pero k předvedení správného postupu podání injekce.

Držte pero pevně přitisknuté
na kůži až do druhého cvaknutí
(nebo po dobu 10 sekund, pokud
se druhé cvaknutí neozve)



Zahajte injekci stisknutím prostředku
aktivačního tlačítka nahoře na
peru palcem.

- › Při stisknutí středu tlačítka se ozve cvaknutí.
- › Pokud se Vám nedaří provést vpich podle popisu, přitlačte pero silněji na kůži a poté znovu stiskněte aktivační tlačítko.
- › Pero nezdvíhejte, dokud se neozve druhé cvaknutí. Po druhém cvaknutí (nebo - neozve-li se cvaknutí - po uplynutí 10 sekund) je injekce aplikována.

Přidržením pera na místě patřičně dlouhou dobu zajistíte podání celé dávky přípravku ENBREL®.



Project and Job Number
706470_1015921

Publication

Insertion Date

Contact

Client
Pfizer Limited

Market
Czech Republic

Operator
Hasan, Gaziul

Revision

Type Area Box (h x w)

–

Trim Box (h x w)
148.0 x 210.0 mm

Bleed Box (h x w)
154.0 x 216.0 mm

Date & Time
09/01/2018 05:23

Operator

Proofreader

Line Manager

Account Manager

Light Box

Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black
Wiro Guide

MYCLIC®


3. krok: Injekční podání roztoku ENBREL®



*Stiskněte střed
aktivačního tlačítka*



*Držte pero pevně přitisknuté na kůži až do druhého cvaknutí
(nebo po dobu 10 sekund, pokud se druhé cvaknutí neozve)*

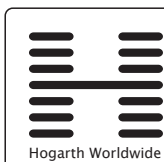

Project and Job Number
706470_1015921

Publication

Insertion Date

Contact

Client

Pfizer Limited

Market

Czech Republic

Operator

Hasan, Gaziul

Revision

Type Area Box (h x w)

–

Trim Box (h x w)

148.0 x 210.0 mm

Bleed Box (h x w)

154.0 x 216.0 mm

Date & Time

09/01/2018 05:23

Operator

Proofreader

Line Manager

Account Manager

Light Box

Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black
Wiro Guide

3. krok: Injekční podání roztoku ENBREL®

Zdvihněte pero MYCLIC® od kůže



Zkontrolujte průzor pera MYCLIC. Musí být celý modrofialový




Tip k předvedení

- › Použijte předváděcí pero k ukázení krytu jehly a modrofialového průzoru pera.

Po dokončení injekce zdvihněte pero od kůže. Modrofialový ochranný kryt jehly se automaticky vysune a zakryje jehlu.

Průzor pera by nyní měl být celý modrofialový, což signalizuje, že dávka byla správně vstříknuta. Není-li modrofialový celý průzor pera, poraďte se se zdravotní sestrou nebo v lékárně. Je možné, že nebyla podána celá dávka roztoku ENBREL®. Nepokoušejte se pero použít znovu ani se nepokoušejte použít jiné pero.

Zpozorujete-li v místě vpichu krev, stlačte vpich vatovým chomáčem nebo gázou na dobu nejméně 10 sekund. Místo vpichu netřete.

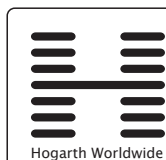

Project and Job Number
706470_1015921

Publication

Insertion Date

Contact

Client
Pfizer Limited

Market
Czech Republic

Operator
Hasan, Gaziul

Revision

Type Area Box (h x w)
–

Trim Box (h x w)
148.0 x 210.0 mm

Bleed Box (h x w)
154.0 x 216.0 mm

Date & Time
09/01/2018 05:23

Operator

Proofreader

Line Manager

Account Manager


Light Box

Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black
Wiro Guide

MYCLIC®

3. krok: Injekční podání roztoku ENBREL®

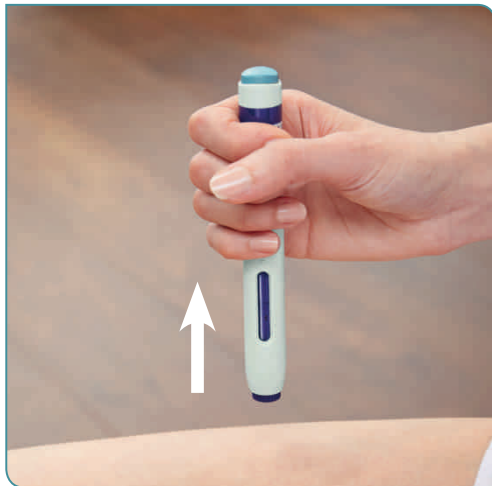

Zdvihněte pero od kůže



Zkontrolujte průzor pera. Musí být celý modrofialový



Project and Job Number
706470_1015921

Publication

Insertion Date

Contact

Client
Pfizer Limited

Market
Czech Republic

Operator
Hasan, Gaziul

Revision

Type Area Box (h x w)

–

Trim Box (h x w)
148.0 x 210.0 mm

Bleed Box (h x w)
154.0 x 216.0 mm

Date & Time
09/01/2018 05:23

Operator

Proofreader

Line Manager

Account Manager

Light Box

Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black
Wiro Guide

4. krok: Likvidace použitého pera MYCLIC®

Použité pero MYCLIC



Řádná likvidace




Tip k předvedení

- › Předvedte řádnou likvidaci použitých pomůcek.

Pero lze použít pouze jednou — NESMÍ být použito opakovaně. NEPOKOUŠEJTE se pero znovu uzavřít krytkou. Řádně zlikvidujte rovněž tampon napuštěný alkoholem a chomáč vaty.

Léky zásadně nesplachujte do výlevky ani NEVYHAZUJTE do běžného odpadu.

S dotazy se obraťte na lékárníka nebo zdravotnického pracovníka obeznámeného s přípravkem ENBREL®.

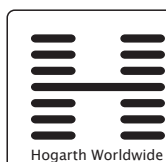

Project and Job Number
706470_1015921

Publication

Insertion Date

Contact

Client
Pfizer Limited

Market
Czech Republic

Operator
Hasan, Gaziul

Revision

Type Area Box (h x w)
—

Trim Box (h x w)
148.0 x 210.0 mm

Bleed Box (h x w)
154.0 x 216.0 mm

Date & Time
09/01/2018 05:23

Operator

Proofreader

Line Manager

Account Manager

Light Box

Light Box



Cyan
Magenta
Yellow
Black
Wiro Guide

MYCLIC®

4. krok: Likvidace použitého pera MYCLIC®

Na použité pero MYCLIC se
NEPOKOUŠEJTE znovu nasadit krytku

Řádná likvidace

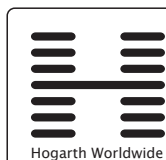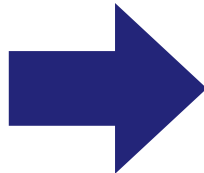

Project and Job Number
706470_1015921

Publication

Insertion Date

Contact

Client
Pfizer Limited

Market
Czech Republic

Operator
Hasan, Gaziul

Revision

Type Area Box (h x w)
–

Trim Box (h x w)
148.0 x 210.0 mm

Bleed Box (h x w)
154.0 x 216.0 mm

Date & Time
09/01/2018 05:23

Operator

Proofreader

Line Manager

Account Manager

Light Box

Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black
Wiro Guide

Klíčové body k úspěšnému podání injekce perem MYCLIC®

- › Vyčkejte přibližně čtvrt až půl hodiny na přirozené ohřátí roztoku ENBREL® v peru na pokojovou teplotu.
- › Aktivační tlačítko stiskněte teprve po pevném přitisknutí pera na kůži tak, aby nebyl vidět modrofialový ochranný kryt jehly.
- › Po celou dobu podávání injekce udržujte silné přitisknutí.
- › Stiskněte střed aktivačního tlačítka nahoře na peru. Ozve se cvaknutí.
- › Pero nezdvihejte, dokud se neozve druhé cvaknutí (nebo, neozve-li se druhé cvaknutí, dokud neuplyne 10 sekund).

Hlášení nežádoucích účinků

Jakékoli podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek a jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených osob musí být hlášeno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Podrobnosti o hlášení najdete na: <http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek>


Adresa pro zaslání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, email: farmakovigilance@sukl.cz.

Pokud se hlášení týká biologického léčiva, je třeba doplnit i přesný obchodní název a číslo šarže. Tato informace může být také hlášena společnosti Pfizer.

CZE.AEReporting@pfizer.com

Telefon: 283 004 111

Fax: 800 500 332

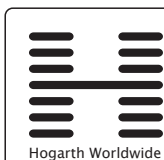

Project and Job Number
706470_1015921

Publication

Insertion Date

Contact

Client
Pfizer Limited

Market
Czech Republic

Operator
Hasan, Gaziul

Revision

Type Area Box (h x w)

–

Trim Box (h x w)
148.0 x 210.0 mm

Bleed Box (h x w)
154.0 x 216.0 mm

Date & Time
09/01/2018 05:23

Operator

Proofreader

Line Manager

Account Manager

Light Box


Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black
Wiro Guide

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním, se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku. Úplná informace o přípravku je k dispozici u reprezentantů, na www.pfizer.cz nebo na adrese společnosti Pfizer.

Pfizer PFE, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, tel.: +420 283 004 111, fax: +420 251 610 270, www.pfizer.cz

ENB-2018.01.001

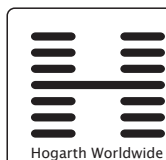

Project and Job Number
706470_1015921

Publication

Insertion Date

Contact

Client
Pfizer Limited

Market
Czech Republic

Operator
Hasan, Gaziul

Revision

Type Area Box (h x w)

–

Trim Box (h x w)
148.0 x 210.0 mm

Bleed Box (h x w)
154.0 x 216.0 mm

Date & Time
09/01/2018 05:23

Operator

Proofreader

Line Manager

Account Manager

Light Box

Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black
Wiro Guide