

PŘÍLOHA Č. 2

Dočasná náhrada hemofiltru Aquamax HF12

Diacap Acute M



Indikace: CVVH, CVVHD, CVVHDF, SCUF.

V současnosti používané	Dočasná náhrada	Produktové odlišnosti, kterým byste měli věnovat pozornost:
Aquamax HF12 (Vyrobeno spol. Bellco)	Diacap Acute M (Vyrobeno spol. B.Braun)	• Typ portu pro připojení je Hansen. Pro připojení k hadicovému setu AQUALINE je třeba použít adaptér Hansen – Luer Lock adapter viz.níže. • Plocha membrány je 1,5 vs. 1,2 m² • Objem pro předplnění je 90 ml vs. 73 ml • Koeficient UF je 60 vs. 51 ml/h/mmHg • Cut-off membrány je 50 kDa vs. 55 kDa • Materiál membrány je PS vs. PES • Způsob sterilizace je gamma vs. ETO

Hansen - Luer Lock adaptér:

Kód produktu: 7210497 (Vyrobeno spol. B.Braun)



Tabulka celkového porovnání:

	Aquamax HF12	Diacap M
Filtr	Hemofiltr	Hemofiltr
Indikace	CVVH, CVVHD, CVVHDF, SCUF	CVVH, CVVHD, CVVHDF, SCUF
Připojení	Luer Lock	Hansen
Potřeba konektoru	Ne	Ano
Objem pro předplnění	73 ml	90 ml
Cut-off membrány	55 kDa	50 kDa
Způsob sterilizace	ETO	Gamma

UF koeficient	51 ml/h/mmHg při Qb= 300ml/min	60 ml/h/mmHg při Qb 300 ml/min
Max TMP	600 mmHg	600 mmHg
Materiál membrány	Polyethersulfone (PES)	Polysulfone (PS)
Velikost plochy membrány	1,2 m ²	1,5 m ²
Max průtok krve za 1 min.	500 ml/min	500 ml/min
Počet ks v balení	20	20

Diacap® Acute M Ultrafiltration rate

