



Stručný návod LIV[®]

- Provozní teplota -20°C až $+45^{\circ}\text{C}$.
- Používejte pouze zařízení určená pro připojení k tomuto výrobku.
- Když ukazatel tlaku manometru (3) vstoupí do červené oblasti, připravte se na výměnu lahví.
- Chcete-li zajistit správný průtok, ujistěte se, že je volič průtoku nastaven na číslo označujícím průtok v litrech za minutu, nikoli mezi dvěma čísly.

Před použitím

- Zkontrolujte, že ukazatel manometru (3) není v červené oblasti.
- Zkontrolujte, zda je volič průtoku (5) nastaven na nulu.
- Pomalu otevřete uzavírací ventil (2) o cca jednu až jednu a půl otáčky ve směru šipky plus „+“.
- Připojte zařízení k hadicovému nástavci (4) nebo k rychlospojce (1).
- Je-li zařízení připojeno k hadicovému nástavci (4), zvolte průtok otáčením voliče průtoku (5).

Pacient může být nyní připojen k zařízení a můžete zahájit léčbu.

Po použití

- Odpojte pacienta od zařízení
- Nastavte volič průtoku (5) na nulu.
- Zavřete uzavírací ventil (2) ve směru šipky mínus „-“.
- Nastavte volič průtoku (5) na plný průtok a vypusťte zbývající plyn z připojených hadic.

→ Nastavte volič průtoku (5) zpět na nulu.

→ Odpojte zařízení (1 nebo 4).

Kompatibilní s magnetickým zobrazovacím zařízením MRI, $\leq 3,0T$.

V průběhu MRI skenování lahvi nepohybujte, mohlo by dojít k ovlivnění kvality snímků

Ventil by měl být nejméně 30 cm od otvoru pro magnet.